

Accufuser XL®

Une gamme de diffuseurs portables avec un volume de 500ml pour les perfusions d'hydratation, d'hyperhydratation, d'antibiothérapie, de corticothérapie et pour l'anesthésie loco-régionale.

**UNE COULEUR
=
UN DÉBIT**



Accufuser XL®

Vendu par boîte de 10 unités.
Volume Minimal = 50% du volume nominal.




| Durée de perfusion | Volume de remplissage ml | Débit ml/h | Volume nominal ml | Volume maximum ml | Référence Accufuser | Couleur |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 2h | 500 | 250 | 500 | 550 | AB2500XL | |
| 5h | 400 à 550 | 100 | 500 | 550 | AB1000XL | |
| 10h | 500 | 50 | 500 | 550 | AB0500XL | |
| 12h | 480 | 40 | 500 | 550 | AB0400XL | |
| 24h | 480 | 20 | 500 | 550 | CT0200XL | |

Tubulures EZ Transfer Set®

Vendues par boîtes de 20.

Accufuser XL[®]

MODE D'EMPLOI

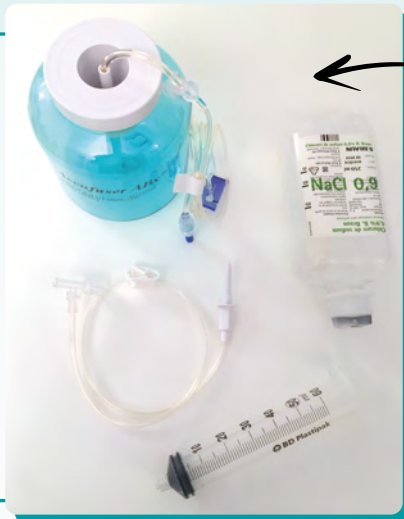

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Accufuser[®] XL
- Poche de soluté
- Tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®])
- Seringue de 50 ml

La tubulure EZ Transfer Set[®]



La tubulure de transfert EZ Transfer Set[®], permet un remplissage facile, rapide et dans des conditions d'asepsie optimales.



Retirer le bouchon du site de remplissage de l'Accufuser[®] XL. Connecter la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]).



Percuter la poche à l'aide de la tubulure.



Visser la seringue de 50 ml sur la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]). Remplir la seringue de soluté et injecter le contenu dans le ballon de l'Accufuser[®] XL. Renouveler l'opération jusqu'au volume souhaité.



Le bouchon hydrophobe assure une purge complète sans manipulation. Retirer la tubulure de transfert (EZ Transfer Set[®]), revisser le bouchon. L'Accufuser[®] XL est prêt.



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE...

01 81 80 21 22 - info@wymfrance.com